




使用方法：

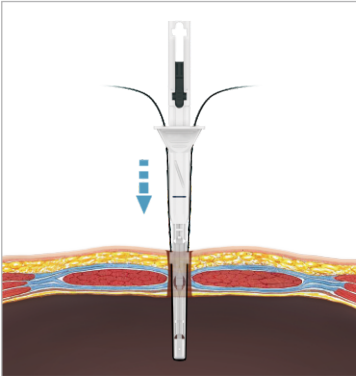


第一步：
从无菌包装取出器械，确认处于闭合状态，将手术缝线固定于器身上，以垂直角度缓慢插入戳孔内。

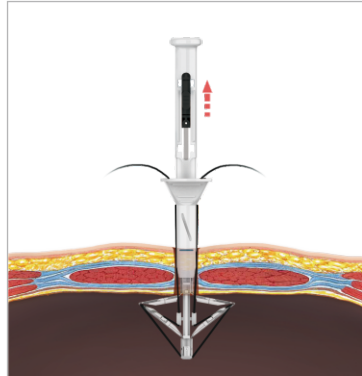


第二步：
打开展开翼，上提器身，使其紧贴筋膜层。

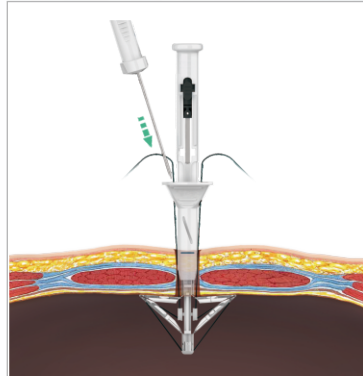


第三步：
使用缝线穿引器分别穿刺两侧需缝合筋膜层。

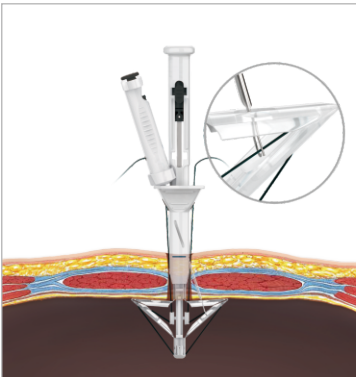

第四步：
使用缝线穿引器主动抓取缝线。

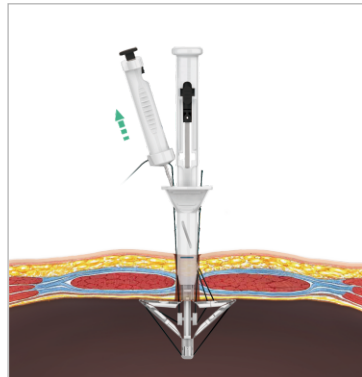

第五步：
缓慢拔出缝线穿引器带出缝线。

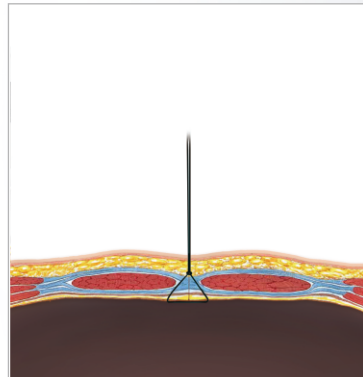

第六步：
带出缝线，撤出器身，牢固打结。



一次性筋膜闭合器套件

(苏械注准20242020092)

邦尼外科医生好助手

帮你外科医生好助手

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号

电话：0519-8818 8331


网址：www.bnylkj.com

邮箱：bnylkj2018@163.com

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

预防穿刺孔疝 手术无后顾之忧

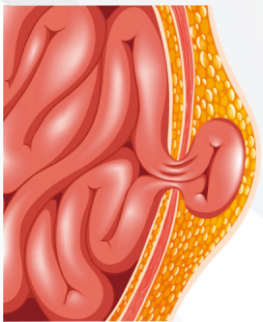

随着腹腔镜手术的普及，由此产生的穿刺孔疝、切口感染等并发症也越来越受到关注。

这不但给患者增加了再次手术的病痛，也加重了患者的经济负担，甚至可能造成不必要的医疗纠纷。

在腹腔镜手术后，穿刺孔疝仍然有一定比例的发生。随着腹腔镜手术的广泛开展，穿刺孔疝的发生率有一定的上升趋势，尤其是在肥胖、体壁较厚的患者上。

而腹腔镜下对腹膜层的缝合，操作困难，导致穿刺孔疝仍然无法杜绝。而市场上出现的筋膜缝合器等耗材，操作复杂，并需要额外提供，导致使用量不大，没有起到减少穿刺孔疝发生率的效果。

适用范围：

用于腹腔镜检查和手术过程中对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔镜手术的工作通道并收拢组织、经皮缝合、闭合手术切口。适用普外科、胃肠外科、肝胆外科、泌尿外科、妇科等科室各类腔镜手术，如高位疝修补、胆囊切除、胃肠道切除、肝叶切除、前列腺手术、肾输尿管手术、卵巢手术的穿刺口缝合。

优势特点：

- ★ 精准严密缝合筋膜层，显著减少穿刺孔疝发生风险
- ★ 独特的穿刺针隐藏保护设计，防止损伤体内脏器
- ★ 缝合线抓取稳定可靠，明显降低操作难度
- ★ 可根据穿刺孔类型，灵活选择合适的缝线
- ★ 流程式操作，简便易用，极大提高工作效率

全新一代一次性筋膜闭合器

中华医学会外科学分会《腹壁切口缝合技术与缝合材料选择中国专家共识(2018版)》推荐：

- 直径>5mm切口必须缝合筋膜层
- 全层整块缝合能够显著降低切口疝及切口裂开的发生率，效果明显优于分层缝合



适配套件：

