




► 8字缝合

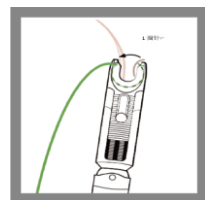


1.从远端开始并向近端移动，将钳口置于组织上，按压手柄两次，将缝合针穿过组织。

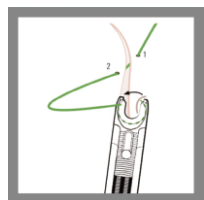

2.将钳口置于第一针的对侧，并稍微低于第一针。

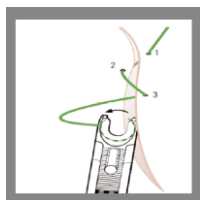


3.将钳口置于对侧，并稍微低于第二针。

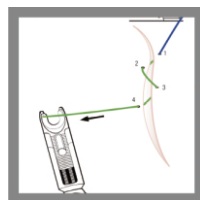


4.将钳口置于对侧，并稍微低于第三针；拉起立柱使用缝合器打结，收紧缝合线。


► 打结—外科结

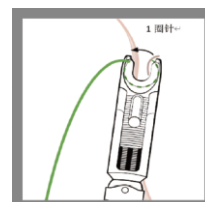


1.将钳口置于组织上。按压手柄两次，将缝合针穿过组织。

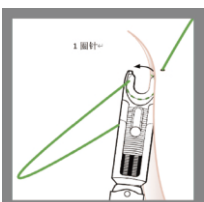

2.将缝线拉出，留下至少3厘米的线尾，必要时在邻近的一侧重复，以牵拉组织。

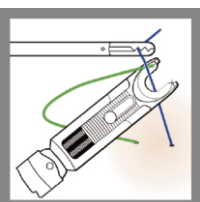


3.用抓钳提起线尾。确保缝合线在钳口上面运行至钳口左端。

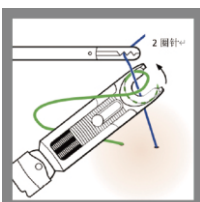


4.将缝合器钳口置于线尾周围，按压手柄4次，缝合针旋转两圈，形成一个外科结。重复上述步骤可以连续打结。


► 打结—方结

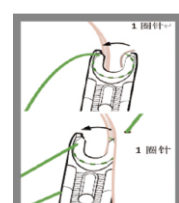


1.将钳口置于组织上。按压手柄两次，将缝合针穿过组织。必要时在邻近的一侧重复，以牵拉组织。

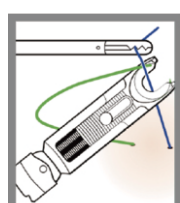


2.将缝合器钳口置于线尾周围，按压手柄2次，缝合针旋转一圈。

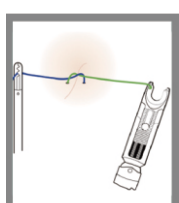

3.牵拉器械，使缝线拉紧。

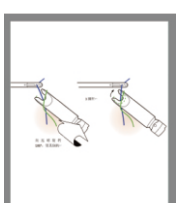


4.用抓钳提起线尾，使器身顺时针旋转180°，将缝线置于钳口，按压手柄2次。

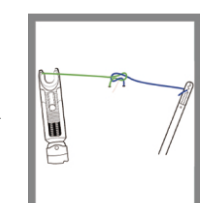


5.牵拉两把器械，将缝线拉紧并锁住结。


► 打结—方结—十字柱

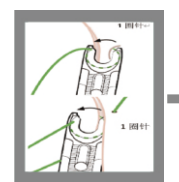


1.将钳口置于组织上。按压手柄两次，将缝合针穿过组织。必要时在邻近的一侧重复，以牵拉组织。

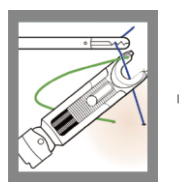

2.将缝合器钳口置于线尾周围，按压手柄4次，缝合针旋转两圈。

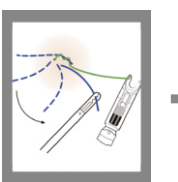


3.牵拉器械使缝线拉紧，拉紧后将线尾移到另一侧右边。

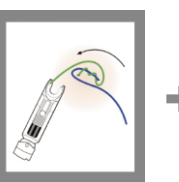

4.同时将缝合器移到结的左边。



5.将缝合器钳口置于线尾周围，按压手柄2次，缝合针旋转一圈。

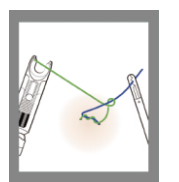

6.牵拉两把器械，将缝线拉紧并锁住结。

SURGICAL INSTRUMENTS THAT CHANGE TRADITIONAL SUTURING METHODS

改变传统缝合方式的手术器械

快捷：

无需矫针，单次安装后可自由连续缝合或打结。

精准：

旋转关节头直达缝合部位，精准缝合。

简单：

学习曲线短，操作自如。

安全：

缝合钳设有安全运动轨迹。

邦尼外科医生好助手

帮你外科医生好助手

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou) Co., Ltd.



地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号

电话：0519-8818 8331

网址：www.bnylkj.com

邮箱：bnylkj2018@163.com

B&N[®]
邦尼医疗
Bonnie Medical

一次性腔镜用
缝合器及组件

Disposable Laparoscopic Stapler
and Components




LET THE STITCHING DO WHATEVER YOU WANT



让缝合随心所欲

一次性腔镜用
缝合器及组件

Disposable laparoscopic stapler and components
(苏械注准20222020938)



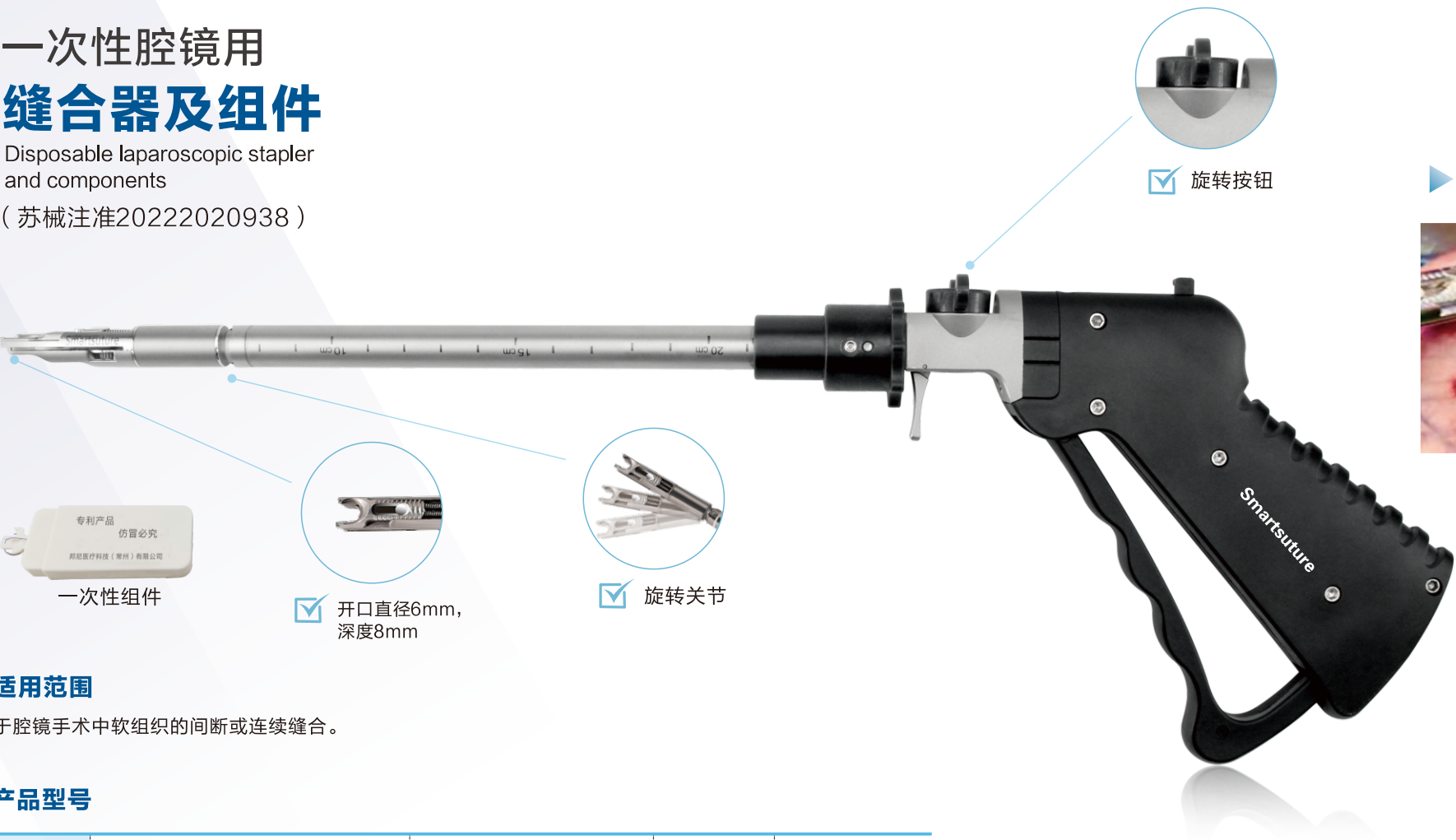


效果演示


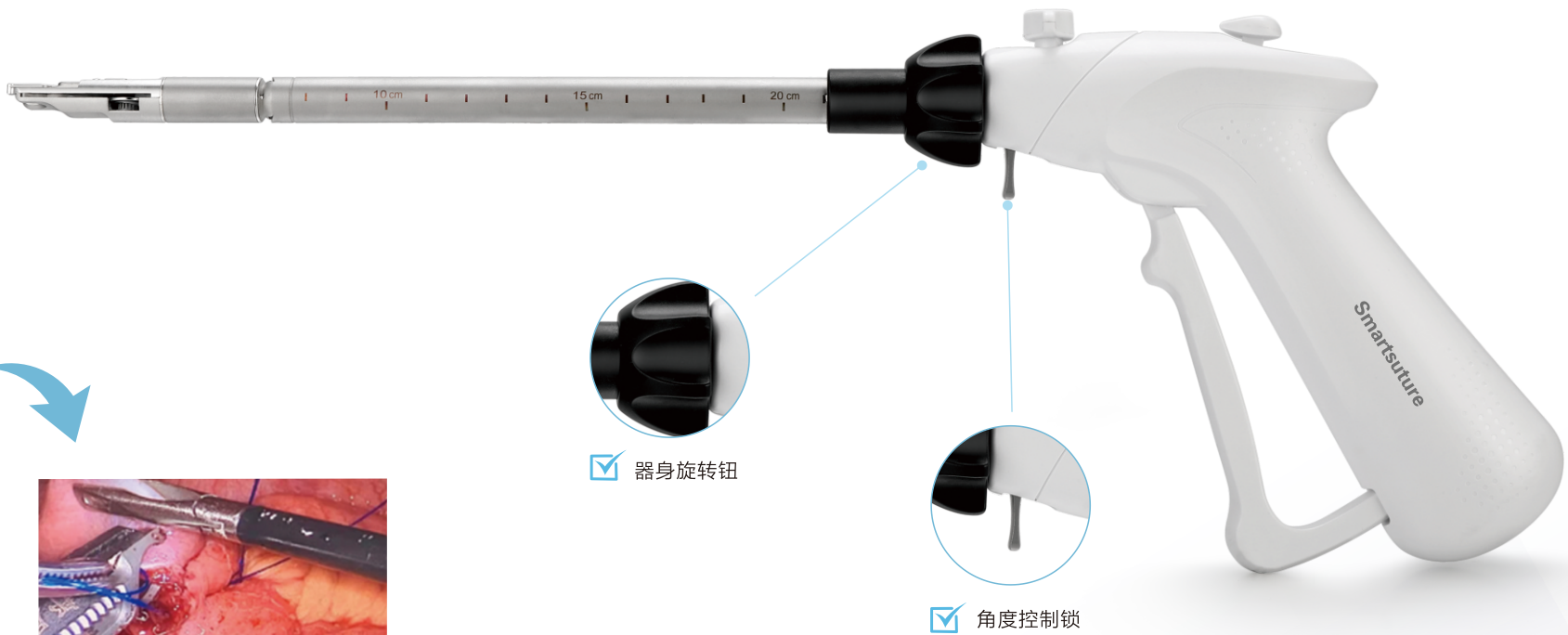
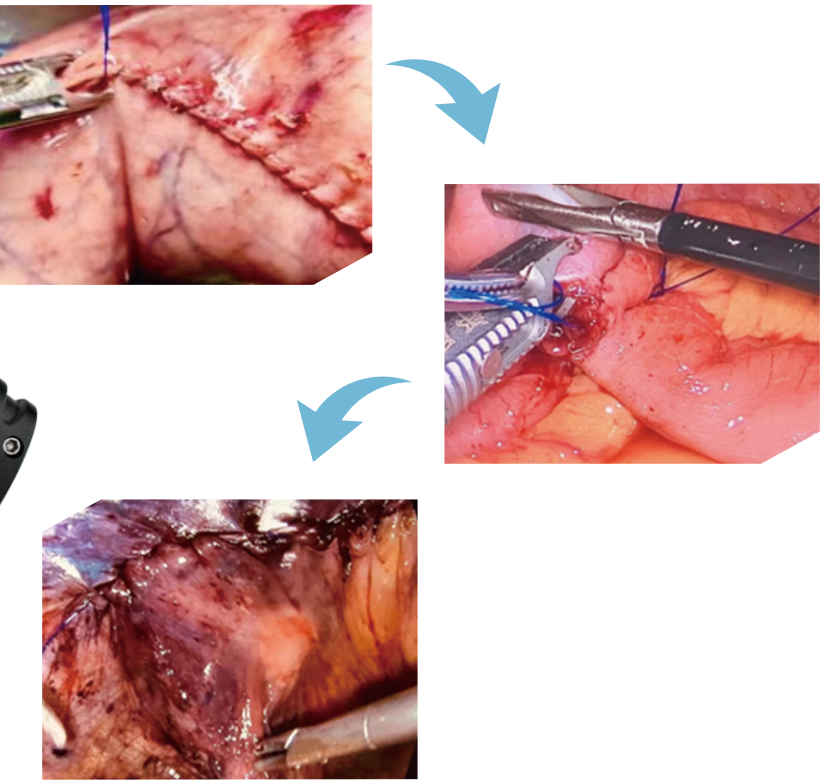


产品操作

连续缝合一向内

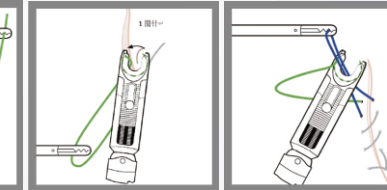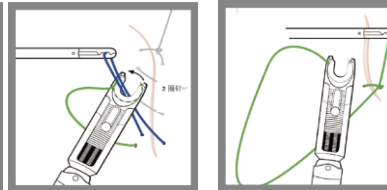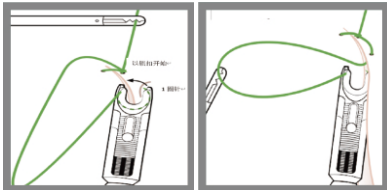

连续缝合一向外

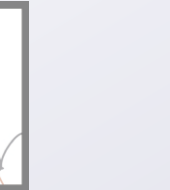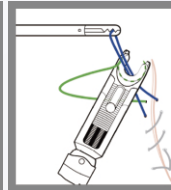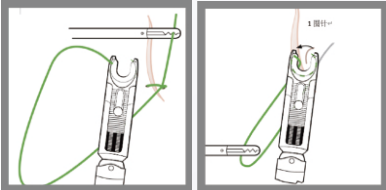

1. 在组织的远端处放置一个锁结。打结前，从组织中抽出足够的缝合线，以确保有足够的缝合线。

2. 确保缝合线保持在左钳口上方，并跟随缝合器，可使用抓钳来管理缝合线。钳口放置在组织上进行所需的缝合。

3. 在最后一次运行针时，使用抓针器抓住最后一圈前段。用圈作为立柱，打出所需的结。
1. 在组织的近端处放置一个锁结。打结前，从组织中抽出足够的缝合线，以确保有足够的缝合线。

2. 确保缝合线保持在左钳口下方和远端尖部后面，这样缝合线就会跟随缝合器，使用抓钳来管理缝合线。

3. 在最后一次运行针时，使用抓针器抓住最后一圈前段。用圈作为立柱，打出所需的结。

术式推荐

适用科室及术式推荐

科室	推荐术式	推荐部位	线径推荐(倒刺线)	线长推荐mm
普外科 (胃肠)	腔镜胃手术	空肠-空肠共同开口	2-0/3-0	200
		胃-肠共同开口		
		系膜裂孔		
	腔镜直肠手术	盆底腹膜	2-0	
胸外科	食道癌手术	袖状胃(SLEEVE)	2-0/3-0	
		胃吻合口加固	2-0/3-0	
		食道裂孔	2-0/3-0	
		管状胃	2-0	
		食道-胃吻合	2-0	

适用范围

适用于腔镜手术中软组织的间断或连续缝合。

产品型号

分类	型号	工作长度	杆径	备注
B01系列	B011121 / B011120	222mm	12mm	1 (弯头) 0 (直头)
	B012121 / B012120	374mm		
	B013121 / B013120	449mm		
B02系列	B021121 / B021120	222mm	12mm	1 (弯头) 0 (直头)
	B022121 / B022120	374mm		
	B023121 / B023120	449mm		

组件型号

一次性组件	缝线规格 (线径)	美标	缝线长度
聚丙烯线 (J)	0 (0.350-0.399)	0	180mm
	1 (0.400-0.499)	1	
	2 (0.300-0.349)	2-0	200mm
	3 (0.200-0.249)	3-0	350mm
聚丙烯倒刺线 (Ja)	4 (0.150-0.199)	4-0	600mm
	5 (0.100-0.149)	5-0	

Smartsuture